

PRODOTTI PER

# STRIPPING IN ORTODONZIA



VALIDITÀ  
**1 GENNAIO 2023**

STRUMENTI  
ABRASIVI  
MANUALI E PER  
IL CONTRANGOLO  
RECIPROCANTE

**Leone**<sup>®</sup>

**Intensiv**  
Swiss Dental Products








# PROCEDURA DI STRIPPING

La riduzione uni/bilaterale dello smalto interprossimale è una procedura che vanta un pluriennale utilizzo clinico. È molto utile per guadagnare spazio, limitando la necessità di estrazioni, nei trattamenti ortodontici sia vestibolari che linguali, mentre è spesso inclusa nella terapia con allineatori.

La linea di prodotti Intensiv dedicata ai **Protocolli IPR (InterProximal Reduction)** permette di effettuare trattamenti precisi dimensionalmente, veloci e sicuri.

La procedura è incrementale, rapida e confortevole per il paziente.

Il protocollo di Stripping in Ortodonzia è stato sviluppato per effettuare, sulla base di una selezione di prodotti, l'apertura dei punti di contatto, la riduzione delle superfici prossimali, il controllo e la verifica dello spazio ottenuto tra i denti ed infine la rifinitura e lucidatura delle superfici.

INIZIO	PROTOCOLLO IPR	TEMPO DI UTILIZZO *	CONTROLLO	FINE
<b>OPENER</b> 	<b>MEDIUM</b> 	0,1mm → 5" circa		<b>CONTOURING</b> 
		0,2mm → 10" circa		
	<b>COARSE</b> 	0,3mm → 3" circa		
		0,4mm → 5" circa		
	<b>EXTRACOARSE</b> 	0,5mm → 7" circa	<b>POLISHING</b> 	
<b>APERTURA PUNTI CONTATTO</b>	<b>RIDUZIONE SMALTO E CREAZIONE SPAZIO TRA DENTI</b>		<b>VERIFICA SPAZIO CREATO</b>	<b>FINITURA E LUCIDATURA</b>

\*Il tempo di utilizzo degli Ortho-Strips è indicativo e dipende dalla pressione esercitata dall'operatore, dalla quantità di irrigazione utilizzata e dall'usura dell'Ortho-Strips.

## IPR-**DistanceControl**

Strumento manuale per la verifica ed il controllo dello spazio creato tra i denti durante la procedura di Stripping.  
Disponibile singolarmente o come Set da 8 pezzi.

Rif. <b>LIPRDC010</b>	spessore 0,10 mm
Rif. <b>LIPRDC015</b>	spessore 0,15 mm
Rif. <b>LIPRDC020</b>	spessore 0,20 mm
Rif. <b>LIPRDC025</b>	spessore 0,25 mm
Rif. <b>LIPRDC030</b>	spessore 0,30 mm
Rif. <b>LIPRDC040</b>	spessore 0,40 mm
Rif. <b>LIPRDC050</b>	spessore 0,50 mm
Rif. <b>LIPRDC100</b>	spessore 1,0 mm

Rif. <b>LIPR-DC-SET</b>	Set con 8 spessori assortiti
-------------------------	------------------------------



### VANTAGGI

- In acciaio inossidabile, garantiscono lunga durata
- Manipolazione sicura grazie all'ottima presa
- Disponibili in varie misure
- Per verificare lo spazio interdentale sommare tra loro i singoli IPR-DistanceControl
- È possibile raggruppare gli elementi con un rivetto





## Intensiv Ortho-Strips, Central *new*

Innovativi Strips oscillanti diamantati nella zona operativa centrale che consentono un trattamento sicuro evitando la creazione di gradini e l'abrasione della dentina.

L'arco leggermente pieghevole permette l'adattamento dello Strip all'anatomia dentale orizzontale e l'adeguamento alle superfici dentali opposte. Ideale per la riduzione, rifinitura e lucidatura dello smalto approssimale in Ortodonzia.

Durante il processo di riduzione, rifinitura e lucidatura dello smalto in Ortodonzia (Stripping) può capitare che si crei un **gradino cervicale** o che si elimini involontariamente dentina nell'area sotto equatoriale del dente, provocando nel paziente una probabile successiva sensibilità dentale.

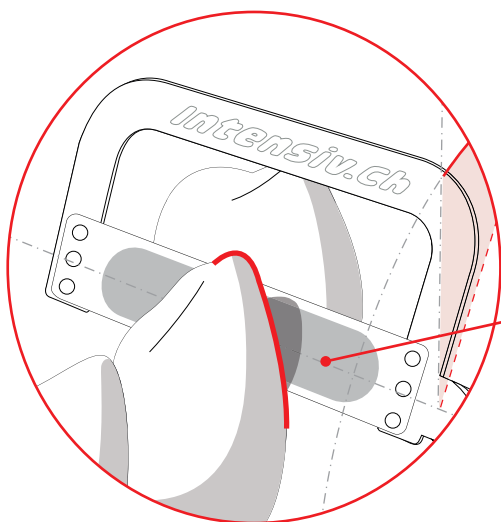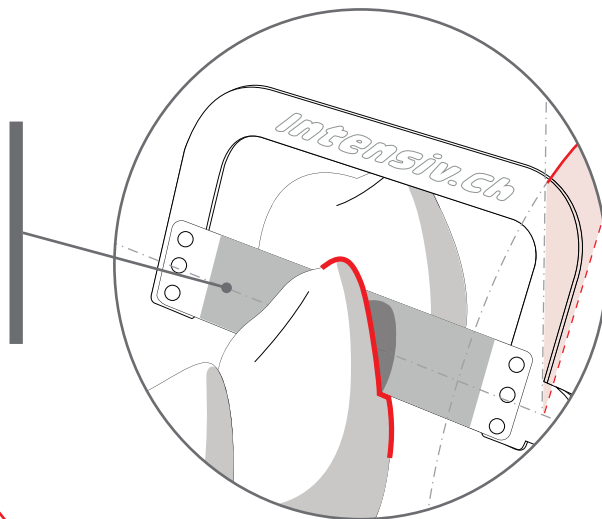

Grazie al rivestimento di diamante nella zona operativa centrale, Intensiv Ortho-Strips System Central consente una elevata precisione nella riduzione, rifinitura e lucidatura approssimale dello smalto **rispettando la morfologia originaria e i tessuti dentali.**

### VANTAGGI:

- Introduzione facilitata tra i punti di contatto interdentali
- Prevenzione della formazione dei gradini cervicali
- L'ipersensibilità dentinale non è favorita
- Mantenimento della morfologia originaria equatoriale del dente
- Sterilizzabili





*new*Intensiv **Ortho-Strips, Central**

Disponibili in 4 granulometrie differenti, nella versione Double-Sided diamantati su due lati, e One-Sided diamantati da un solo lato, nelle varianti "L", **left** (lato sinistro) e "R", **right** (lato destro) per i lati mesiali e distali nel mascellare superiore ed inferiore.

- Spessore dello Strip non diamantato: 0,05 mm
- Altezza totale dello Strip: 3,7 mm
- Altezza della zona diamantata: 2,7 mm
- Lunghezza della zona diamantata: 13 mm

Rif. **LOST400Set02/6**Tray **Ortho-Strips, Central**


Tray in acciaio inox con 6 inserti e siliconi colorati.

**CONTENUTO:**

- 2 Ortho-Strips, Double-Sided
  - Rif. **LOS08OP**, Ortho-Strips, Opener
  - Rif. **LOS80C**, Ortho-Strips, Extracoarse
- 4 Ortho-Strips, Central Double-Sided
  - Rif. **LOS60C-CEN-DS**, Ortho-Strips, Central Coarse
  - Rif. **LOS40M-CEN-DS**, Ortho-Strips, Central Medium
  - Rif. **LOS25F-CEN-DS**, Ortho-Strips, Central Contouring
  - Rif. **LOS15POL-CEN-DS**, Ortho-Strips, Central Polishing

Rif. **L6000/WG-69A** senza luce  
 Rif. **L6000/WG-69LT** con luce

## Intensiv IPR Set

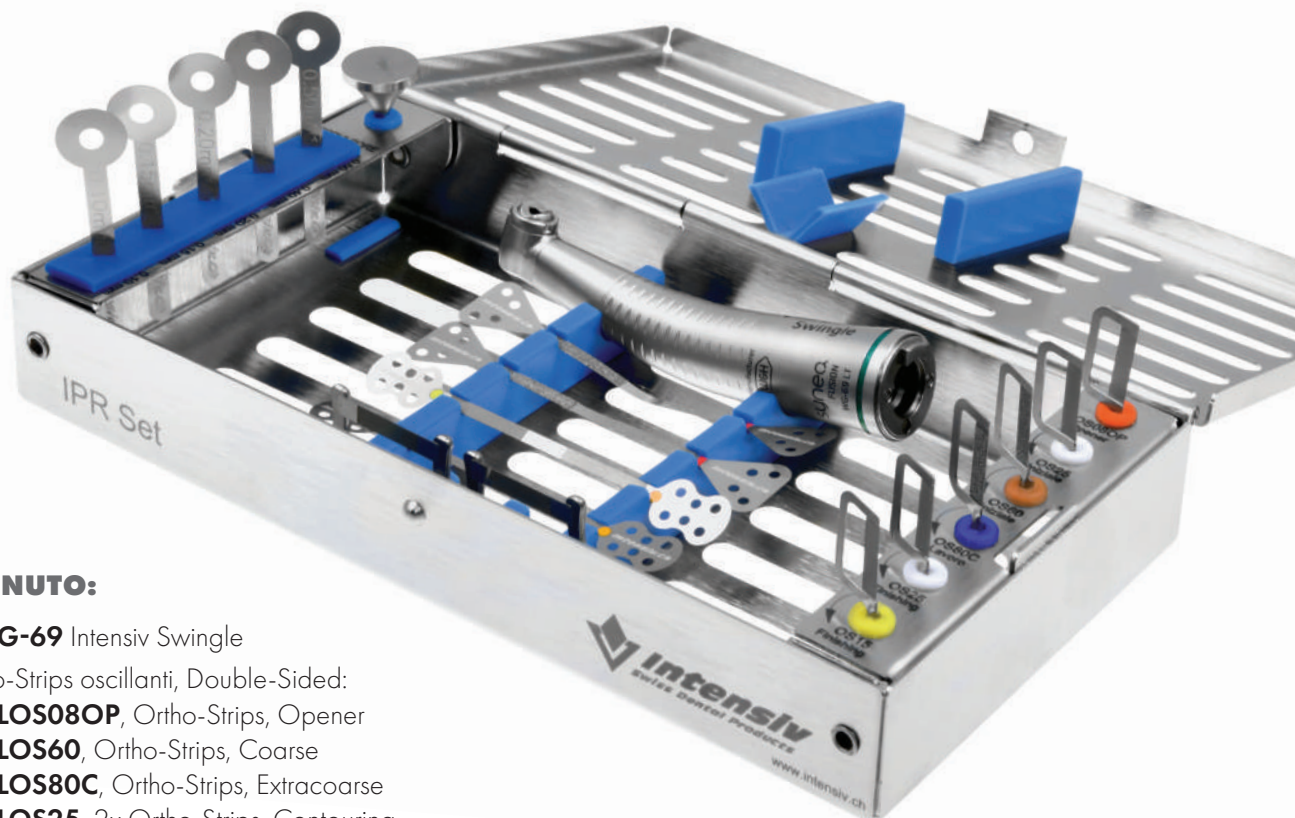

### CONTENUTO:

- Rif. **LWG-69** Intensiv Swingle
- 6 Ortho-Strips oscillanti, Double-Sided:
  - Rif. **LOS08OP**, Ortho-Strips, Opener
  - Rif. **LOS60**, Ortho-Strips, Coarse
  - Rif. **LOS80C**, Ortho-Strips, Extracoarse
  - Rif. **LOS25**, 2x Ortho-Strips, Contouring
  - Rif. **LOS15**, Ortho-Strips, Polishing
- 5 IPR-DistanceControl:
  - Rif. **LIPRDC010** (spessore 0,10 mm)
  - Rif. **LIPRDC015** (spessore 0,15 mm)
  - Rif. **LIPRDC020** (spessore 0,20 mm)
  - Rif. **LIPRDC030** (spessore 0,30 mm)
  - Rif. **LIPRDC050** (spessore 0,50 mm)
- 4 Ortho-Strips Manuali
  - Rif. **LOSM8040**, 2x grana Grossa/Media
  - Rif. **LOSM1508**, 2x grana Extra/Ultrafine
- 2 ApproxOpener
  - Rif. **LAO2018OS**, One-Sided
  - Rif. **LAO2018DS**, Double-Sided
- Rif. **L053** Espulsore Intensiv Swingle

Il tray mette a disposizione tutti gli strumenti per lo Stripping disposti in modo ergonomico e pratico per il trattamento di ogni paziente.

Composto da base e coperchio collegati da una cerniera, è realizzato in acciaio inox lucido e presenta dimensioni idonee alla sterilizzazione in autoclave.

Gli Ortho-Strips e i misuratori di spazio sono inseriti in due supporti interni pieghevoli che riportano i numeri di articolo degli strumenti e il colore di riferimento. Questi supporti devono essere orientati parallelamente al piano di lavoro durante l'uso degli strumenti e ripiegati all'interno dopo aver igienizzato il contenuto del tray, che sarà pronto per la sterilizzazione.

Rif. **L071**



## Refill per IPR Set


### CONTENUTO: 6 Ortho-Strips Double-Sided

- Rif. **LOS08OP**, Ortho-Strips, Opener
- Rif. **LOS60**, Ortho-Strips, Coarse
- Rif. **LOS80C**, Ortho-Strips, Extracoarse
- Rif. **LOS25**, 2x Ortho-Strips, Contouring
- Rif. **LOS15**, Ortho-Strips, Polishing

Rif. **LWG-69 A** senza luce

Rif. **LWG-69 LT** con luce

## Intensiv Swingle

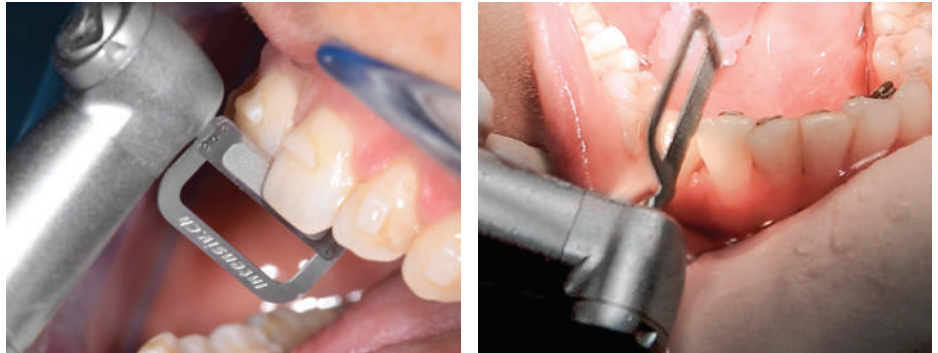

### CARATTERISTICHE:

- 2 funzioni in un solo contrangolo con micro-mecanismo duale attivato da un pulsante sul retro della testina, per scegliere tra posizione assiale fissa o rotazione assiale libera di Intensiv Ortho-Strips System
- Contrangolo dotato di sistema spray e luce integrati
- Movimento reciprocante da 0,9 mm; 20.000 oscillazioni con 40.000 rpm
- 12 posizioni fisse (ogni 30° su 360°)
- Movimento libero per il posizionamento di Ortho-Strips nella posizione desiderata
- 2 anni di garanzia
- Sterilizzabile

### CONTENUTO DEL KIT:

- Rif. **LWG-69**, Swingle
- Rif. **L053**, Espulsore Swingle
- Rif. **L054**, Pulitore Swingle
- Rif. **LOS40**, Ortho-Strips, Medium



Rif. **L053**

## Espulsore Intensiv Swingle



Strumento utile per rimuovere gli Ortho-Strips dal contrangolo.



## Intensiv Ortho-Strips


Strips oscillanti diamantati da entrambi i lati per la riduzione, rifinitura e lucidatura approssimale dello smalto in Ortodonzia (IPR). Da utilizzare in progressione in base all'esigenza di spazio diagnosticato necessario nel trattamento con allineatori, brackets o dispositivi rimovibili. Disponibili singolarmente o come set.

Pulire e sterilizzare accuratamente gli Ortho-Strips dopo ogni utilizzo per garantirne una durata maggiore.




### Opener

Apertura punti di contatto  
(granulometria 8µm)

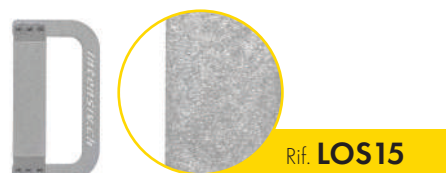


### Polishing

Lucidatura superfici trattate  
(granulometria 15µm)

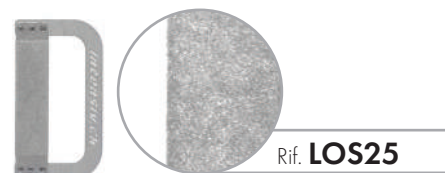


### Contouring

Finitura superfici trattate  
(granulometria 25µm)

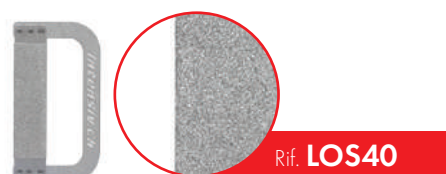


### Medium

Modellazione smalto approssimale  
(granulometria 40µm)

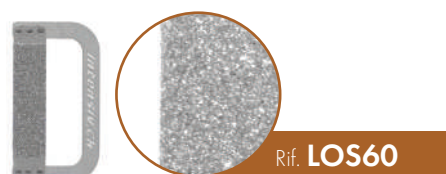

### Coarse

Riduzione smalto approssimale  
(granulometria 60µm)

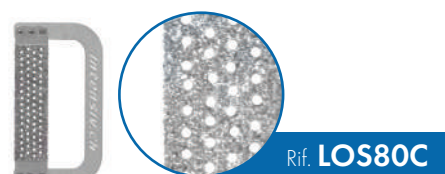

### Extracoarse

Creazione spazio  
(granulometria 80µm)

Rif. **L065DS** Double-Sided  
Rif. **L065L** One-Sided, Left  
Rif. **L065R** One-Sided, Right



## Intensiv Kit Ortho-Strips

### CONTENUTO:

- Ref. **LOS08OP**, Ortho-Strips, Opener
- Ref. **LOS40**, Ortho-Strips, Medium
- Ref. **LOS60**, Ortho-Strips, Coarse
- Ref. **LOS80C**, Ortho-Strips, Extracoarse
- Ref. **LOS25**, Ortho-Strips, Contouring
- Ref. **LOS15**, Ortho-Strips, Polishing

Rif. **LOST400** vuoto



## Intensiv Tray Ortho-Strips

Tray compatto in acciaio inox con 6 inserti in silicone colorato per lo stoccaggio e la protezione degli Ortho-Strips oscillanti.

Rif. **L056ASS/6**



## Ricambi inserti in silicone

6 pezzi in colori assortiti.



## Intensiv **ApproxOpener**

Disegnati per consentire l'apertura manuale dei punti di contatto particolarmente stretti: la speciale conformazione del margine e lo spessore di soli 8µm favoriscono la precisione dell'inserimento della lama.

Diamantati da entrambi i lati o da un solo lato, la scelta fra i due tipi di strumento avviene in base alla necessità di trattamento monolaterale del dente da ridurre o per il trattamento di entrambe le superfici interprossimali adiacenti.



Rif. **LAO2018OS**

- **Ultrafine**  
(granulometria 8µm)
- diamantato  
da un solo lato



Rif. **LAO2018DS**

- **Ultrafine**  
(granulometria 8µm)
- diamantato  
da entrambi i lati



## Ortho-Strips **Manuali**

Strips perforati sulla superficie di lavoro con due granulometrie diverse, ideali per la riduzione e rifinitura dello smalto interprossimale.

Diamantati da un solo lato.

Sterilizzabili, multiuso.



Rif. **LOSM1508**

Per la rifinitura e lucidatura delle superfici trattate.  
Diamantato da un solo lato.

Disponibile con due tipi di granulometrie:

- **Polishing** (giallo, granulometria 15µm)
- **Opener** (arancione, granulometria 8µm)



### VANTAGGI


- Efficiente lucidatura dello smalto interprossimale
- Prese sagomate per una migliore tenuta manuale durante il trattamento

Rif. **LOSM8040**

Per la creazione manuale dello spazio.  
Diamantato da un solo lato.

Disponibile con due tipi di granulometrie:

- **Extracoarse** (blu, granulometria 80µm)
- **Medium** (rosso, granulometria 40µm)

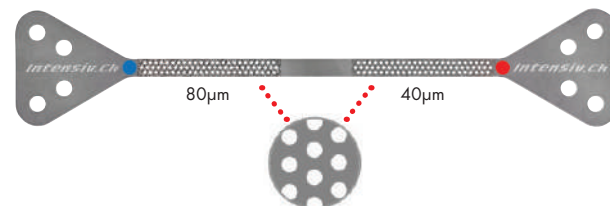

### VANTAGGI

- Trattamento senza frizioni grazie alle perforazioni della parte lavorante
- Efficiente riduzione dello smalto interprossimale
- Prese triangolari per una migliore tenuta manuale durante il trattamento

# LISTINO PRODOTTI

REF.

DESCRIZIONE

GRANULOMETRIA  
DEL DIAMANTEQ.TÀ x  
CONF.PREZZO  
IN EURO\*

## STRUMENTI MECCANICI



LIPR 6000/WG-69LT	IPR Set, Tray con contrangolo con luce		19 pz	1.825,00
LIPR 6000/WG-69A	IPR Set, Tray con contrangolo senza luce		19 pz	1.455,00
LIPR 6000	IPR Tray, vuoto		1 pz	285,00
LWG-69 LT	Intensiv Swingle, con luce		1 pz	1.170,00
LWG-69 A	Intensiv Swingle, senza luce		1 pz	790,00
L053	Espulsore Intensiv Swingle		1 pz	30,40
L054	Pulitore Intensiv Swingle		1 pz	14,25

## ORTHO-STRIPS



LOS08OP/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Opener	8µm	3 pz	84,60
LOS08OP-L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Opener	8µm	3 pz	84,60
LOS08OP-R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Opener	8µm	3 pz	84,60
LOS15/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Polishing	15µm	3 pz	84,60
LOS15L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Polishing	15µm	3 pz	84,60
LOS15R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Polishing	15µm	3 pz	84,60
LOS25/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Contouring	25 µm	3 pz	84,60
LOS25L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Contouring	25µm	3 pz	84,60
LOS25R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Contouring	25µm	3 pz	84,60
LOS40/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Medium	40µm	3 pz	84,60
LOS40L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Medium	40µm	3 pz	84,60
LOS40R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Medium	40µm	3 pz	84,60
LOS60/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Coarse	60µm	3 pz	84,60
LOS60L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Coarse	60µm	3 pz	84,60
LOS60R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Coarse	60µm	3 pz	84,60
LOS80C/3	Ortho-Strips, Double-Sided, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
LOS80C-L/3	Ortho-Strips, One-Sided left, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
LOS80C-R/3	Ortho-Strips, One-Sided right, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
L071	Refill per IPR Set, Double-Sided		6 pz	156,60
L065DS	Kit completo Ortho-Strips, Double-Sided		6 pz	156,60
L065L	Kit completo Ortho-Strips, One-Sided left		6 pz	156,60
L065R	Kit completo Ortho-Strips, One-Sided right		6 pz	156,60
LOST400	Tray Ortho-Strips con 6 inserti		1 pz	49,00
L056ASS/6	Ricambi inserti in silicone		6 pz	8,80


REF.

DESCRIZIONE



GRANULOMETRIA  
DEL DIAMANTEQ.TÀ x  
CONF.PREZZO  
IN EURO\***new****ORTHO-STRIPS CENTRAL**

	LOS15POL-CEN-DS/3	Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS15POL-CEN-L/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS15POL-CEN-R/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	LOS25F-CEN-DS/3	Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Contouring	25µm	3 pz	84,60
	LOS25F-CEN-L/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Contouring	25µm	3 pz	84,60
	LOS25F-CEN-R/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Contouring	25µm	3 pz	84,60
	LOS40M-CEN-DS/3	Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS40M-CEN-L/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS40M-CEN-R/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Medium	40µm	3 pz	84,60
	LOS60C-CEN-DS/3	Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOS60C-CEN-L/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOS60C-CEN-R/3	Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	LOST400Set02/6	Tray Ortho-Strips, Central, Double-Sided		6 pz	167,40
	LOSSetCEN02L/6	Tray Ortho-Strips, Central, One-Sided left		6 pz	156,60
	LOSSetCEN02R/6	Tray Ortho-Strips, Central, One-Sided right		6 pz	156,60

**SPESSIMETRI**

	LIPRDC010/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,10 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC015/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,15 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC020/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,20 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC025/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,25 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC030/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,30 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC040/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,40 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC050/3	IPR-DistanceControl, spessore 0,50 mm		3 pz	27,50
	LIPRDC100/3	IPR-DistanceControl, spessore 1,0 mm		3 pz	27,50
	LIPR-DC SET	Set IPR-DistanceControl		8 pz	68,00

**STRUMENTI MANUALI**

	LAO2018DS/3	ApproxOpener, Double-Sided	8µm	3 pz	77,50
	LAO2018OS/3	ApproxOpener, One-Sided	8µm	3 pz	77,50
	LOSM1508/6	Ortho-Strips Manuali FE	8/15µm	6 pz	70,80
	LOSM8040/6	Ortho-Strips Manuali CM	40/80µm	6 pz	70,80

PRODOTTI PER  
**STRIPPING**  
IN ORTODONZIA

SI RINGRAZIANO  
PER LE FOTOGRAFIE  
CLINICHE CONCESSE:

- DOTT. M. CIRAVOLO, NAPOLI, ITALIA
- DOTT. F. GARINO, TORINO, ITALIA
- DOTT.SSA G. FORTINI, FIRENZE, ITALIA
- DOTT.SSA E. CARLI, MASSA CARRARA, ITALIA
- DOTT. A. CABURLOTTO, VENEZIA, ITALIA
- DOTT. F. GIUNTOLI, PISTOIA, ITALIA

FABBRICATO DA



**INTENSIV SA**

Via Molino 107  
6926 Montagnola, Svizzera  
Tel. +41 91 986 50 50  
Fax +41 91 986 50 59  
info@intensiv.ch  
**www.intensiv.ch**

DISTRIBUITO IN ITALIA DA



**LEONE S.p.A.**

Via P. a Quaracchi 50  
50019 Sesto Fiorentino, Firenze, Italia  
Tel. +39 055 30 44 1  
Fax +39 055 37 48 08  
info@leone.it  
**www.leone.it**

**UFFICIO VENDITE ITALIA**

Tel. +39 055 30 44 600  
Fax +39 055 37 48 08  
italia@leone.it