

PRODOTTI PER

STRIPPING

IN ORTODONZIA

Strumenti
abrasivi manuali
e per il contrangolo
reciprocante

VALIDITÀ
1 SETTEMBRE
2025

Leone[®]



Intensiv
Swiss Dental Products

PROCEDURA

La riduzione uni/bilaterale dello smalto interprossimale è una procedura che vanta un pluriennale utilizzo clinico. È molto utile per guadagnare spazio, limitando la necessità di estrazioni, nei trattamenti ortodontici sia vestibolari che linguali, mentre è spesso inclusa nella terapia con allineatori.

La linea di prodotti Intensiv dedicata ai **Protocolli IPR (InterProximal Reduction)** permette di effettuare trattamenti precisi dimensionalmente, veloci e sicuri. La procedura è incrementale, rapida e confortevole per il paziente.

Il protocollo di Stripping in Ortodonzia è stato sviluppato per effettuare, sulla base di una selezione di prodotti, l'apertura dei punti di contatto, la riduzione delle superfici prossimali, il controllo e la verifica dello spazio ottenuto tra i denti ed infine la rifinitura e lucidatura delle superfici.

PROTOCOLLO IPR STANDARD

STEP 1		STEP 2		STEP 3
APERTURA DEI PUNTI DI CONTATTO TEMPO DI UTILIZZO*		RIDUZIONE DELLO SMALTO STANDARD TEMPO DI UTILIZZO*	+ VERIFICA DELLO SPAZIO CREATO **	LUCIDATURA
OPENER	0,1 mm ↓ 15" circa	MEDIUM	0,2 mm → 10" circa 0,3 mm o oltre → 15" circa	POLISHING

PROTOCOLLO IPR PIÙ RAPIDO

STEP 1		STEP 2		STEP 3	STEP 4
APERTURA DEI PUNTI DI CONTATTO		RIDUZIONE PIÙ RAPIDA DELLO SMALTO		FINITURA	LUCIDATURA
TEMPO DI UTILIZZO*		TEMPO DI UTILIZZO*			
OPENER	0,2mm	COARSE	0,3mm → 5" circa	FINISHING	POLISHING
	30" circa		0,4mm o oltre → 10" circa		
	EXTRACOARSE		0,5mm → 10" circa		
		+ VERIFICA DELLO SPAZIO CREATO **			

*Il tempo di utilizzo degli Intensiv Ortho-Strips è indicativo e dipende dalla pressione esercitata dall'operatore, dalla quantità di irrigazione utilizzata e dall'usura dell'Ortho-Strips.

**Intensiv IPR-DistanceControl è lo strumento manuale fondamentale per la verifica ed il controllo dello spazio creato tra i denti durante la procedura di Stripping (per i dettagli consultare pag. 8).



ORTHO-STRIPS[®], CENTRAL

NEW

Innovativi Strips oscillanti diamantati nella zona operativa centrale che consentono un trattamento sicuro evitando la creazione di gradini e l'abrasione della dentina.

L'arco leggermente pieghevole permette l'adattamento dello Strip all'anatomia dentale orizzontale e l'adeguamento alle superfici dentali opposte. Ideale per la riduzione, rifinitura e lucidatura dello smalto approssimale in Ortodonzia.

Durante il processo di riduzione, rifinitura e lucidatura dello smalto in Ortodonzia (Stripping) può capitare che si crei un **gradino cervicale** o che si elimini involontariamente dentina nell'area sotto equatoriale del dente, provocando nel paziente una probabile successiva sensibilità dentale.

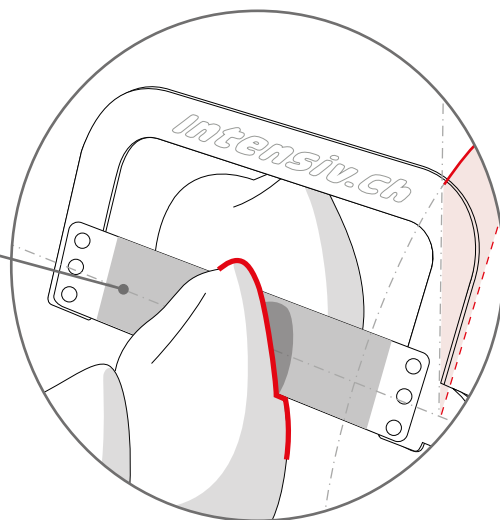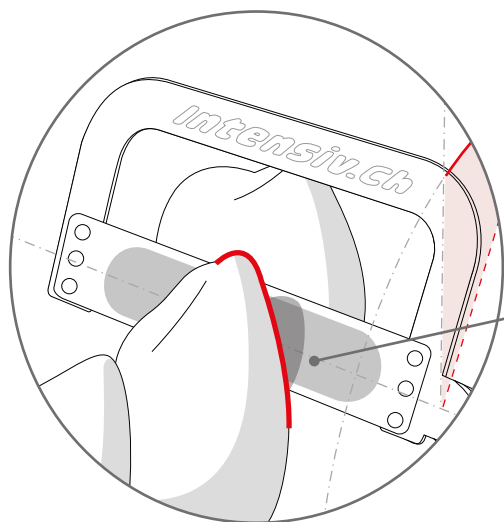

Grazie al rivestimento di diamante nella zona operativa centrale, Intensiv Ortho-Strips System, Central consente una elevata precisione nella riduzione, rifinitura e lucidatura approssimale dello smalto **rispettando la morfologia originaria e i tessuti dentali**.

VANTAGGI:

- Introduzione facilitata tra i punti di contatto interdentali
- Prevenzione della formazione dei gradini cervicali
- L'ipersensibilità dentinale non è favorita
- Mantenimento della morfologia originaria equatoriale del dente
- Sterilizzabili

La linea Intensiv Ortho-Strips Central è stata ideata e realizzata in collaborazione con il Dr. H. Goldbecher, Halle, Germania



VIDEO
INTENSIV IPR
DR. NEVES



VIDEO
UTILIZZO CLINICO
INTENSIV ORHO-STRIPS,
CENTRAL
DR. CABURLOTTO



INTENSIV ORTHO-STRIPS[®], CENTRAL

NEW

Disponibili in 4 granulometrie differenti, nella versione Double-Sided diamantati su due lati, e One-Sided diamantati da un solo lato, nelle varianti "L", **left** (lato sinistro) e "R", **right** (lato destro) per i lati mesiali e distali nel mascellare superiore ed inferiore.

- Spessore dello Strip non diamantato: 0,05 mm
- Altezza totale dello Strip: 3,7 mm
- Altezza della zona diamantata: 2,7 mm
- Lunghezza della zona diamantata: 13 mm



Dr. F. Garino, Torino, Italia



Rif. **WG-69ASWISS** senza luce
Rif. **WG-69LTSWISS** con luce

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1 SWISS EDITION

IL CONTRANGOLO DUALE INTENSIV SWINGLE

- Con interruttore a scatto per scegliere la rotazione assiale libera o posizione fissa degli strumenti oscillanti
- Migliore design per una presa sicura del contrangolo
- Lo speciale rivestimento garantisce una protezione duratura contro i graffi delle superfici
- Contrangolo reciprocante con spruzzo d'acqua integrato e luce opzionale
- Movimento oscillatorio 0,9 mm
- 20.000 oscillazioni a 40.000 giri/min.

VANTAGGI:

- Superficie del contrangolo resistente e impeccabile, grazie allo speciale rivestimento resistente ai graffi e durevole
- 20.000 oscillazioni al minuto per una migliore prestazione di levigatura e lucidatura
- 3 anni di garanzia
- Primo servizio da W&H gratuito



Dr. F. Garino, Torino, Italia



Interruttore a scatto fissato verso il basso:
strumenti oscillanti in posizione assiale fissa.

Interruttore a scatto fissato verso l'alto:
strumenti oscillanti a rotazione assiale libera.

Rif. **053**

Espulsore Intensiv Swingle

Strumento necessario per rimuovere gli Intensiv Ortho-Strips dal contrangolo.



INTENSIV ORTHO-STRIPS®

Strips oscillanti diamantati da entrambi i lati per la riduzione, rifinitura e lucidatura approssimale dello smalto in Ortodonzia (IPR). Da utilizzare in progressione in base all'esigenza di spazio diagnosticato necessario nel trattamento con allineatori, brackets o dispositivi rimovibili. Disponibili singolarmente o come set.

Pulire e sterilizzare accuratamente gli Intensiv Ortho-Strips dopo ogni utilizzo per garantirne una durata maggiore.



Rif. OST400 vuoto



Intensiv Ortho-Strips® Tray

Tray compatto in acciaio inox con 6 inserti in silicone colorato per lo stoccaggio e la protezione degli Intensiv Ortho-Strips oscillanti.

Rif. OSSet02/6
Rif. OSSet02L/6
Rif. OSSet02R/6

Refill Intensiv Ortho-Strips®



Rif. OSSetCEN02/6
Rif. OSSetCEN02L/6
Rif. OSSetCEN02R/6

Refill Intensiv Ortho-Strips® Central



STANDARD

Rif. OST400Set03/6

NEW



Intensiv Ortho-Strips® Tray

Tray in acciaio inox con 6 inserti e siliconi colorati.

CONTENUTO:

- 2 Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided
- 2 Rif. OS08OP-DS, 08 µm, arancione, apertura
- 4 Intensiv Ortho-Strips, Central Double-Sided
- 3 Rif. OS40M-CEN-DS, 40 µm, rosso, riduzione contornata
- 1 Rif. OS15POL-CEN-DS, 15 µm, giallo, lucidatura

ESTESO

Rif. OST400Set01/6

NEW



Intensiv Ortho-Strips® Tray

Tray in acciaio inox con 6 inserti e siliconi colorati.

CONTENUTO:

- 1 Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided
- 1 Rif. OS08OP-DS, 08 µm, arancione, apertura
- 5 Intensiv Ortho-Strips, Central Double-Sided
- 1 Rif. OS60C-CEN-DS, 60 µm, marrone, riduzione rapida
- 2 Rif. OS40M-CEN-DS, 40 µm, rosso, riduzione contornata
- 1 Rif. OS25F-CEN-DS, 25 µm, bianco, rifinitura
- 1 Rif. OS15POL-CEN-DS, 15 µm, giallo, lucidatura

COMPLETO

Rif. OST400Set02/6

NEW



Intensiv Ortho-Strips® Tray

Tray in acciaio inox con 6 inserti e siliconi colorati.

CONTENUTO:

- 2 Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided
- 1 Rif. OS08OP-DS, 08 µm, arancione, apertura
- 1 Rif. OS80XC-DS, 80 µm, blu, riduzione ultra rapida
- 4 Intensiv Ortho-Strips, Central Double-Sided
- 1 Rif. OS60C-CEN-DS, 60 µm, marrone, riduzione rapida
- 1 Rif. OS40M-CEN-DS, 40 µm, rosso, riduzione contornata
- 1 Rif. OS25F-CEN-DS, 25 µm, bianco, rifinitura
- 1 Rif. OS15POL-CEN-DS, 15 µm, giallo, lucidatura

INTENSIV IPR-DC SET



Intensiv IPR-DistanceControl è lo strumento manuale fondamentale per la verifica ed il controllo dello spazio creato tra i denti durante la procedura di Stripping. **Disponibile singolarmente o come Set da 8 pezzi.**

Rif. IPRDC010

spessore 0,10 mm

Rif. IPRDC015

spessore 0,15 mm

Rif. IPRDC020

spessore 0,20 mm

Rif. IPRDC025

spessore 0,25 mm

Rif. IPRDC030

spessore 0,30 mm

Rif. IPRDC040

spessore 0,40 mm

Rif. IPRDC050

spessore 0,50 mm

Rif. IPRDC100

spessore 1,0 mm

Rif. IPR-DC SET

Set con 8 spessori assortiti



VANTAGGI

- In acciaio inossidabile, garantiscono lunga durata
- Manipolazione sicura grazie all'ottima presa
- Disponibili in varie misure
- Per verificare lo spazio interdentale sommare tra loro i singoli Intensiv IPR-DistanceControl
- È possibile raggruppare gli elementi con un rivetto



Dr. F. Garino, Torino, Italia



Intensiv ApproxOpener

Disegnati per consentire l'apertura manuale dei punti di contatto particolarmente stretti: la speciale conformazione del margine e lo spessore di soli 8µm favoriscono la precisione dell'inserimento della lama.

Diamantati da entrambi i lati o da un solo lato, la scelta fra i due tipi di strumento avviene in base alla necessità di trattamento monolaterale del dente da ridurre o per il trattamento di entrambe le superfici interprossimali adiacenti.



Rif. AO2018OS

- **Ultrafine**
(granulometria 8µm)
- diamantato
da un solo lato



Rif. AO2018DS

- **Ultrafine**
(granulometria 8µm)
- diamantato
da entrambi i lati



Intensiv Strips Manuali

Strips perforati sulla superficie di lavoro con due granulometrie diverse, ideali per la riduzione e rifinitura dello smalto interprossimale.

Diamantati da un solo lato. Sterilizzabili, multiuso.



Rif. PXPO1508

Per la rifinitura e lucidatura delle superfici trattate.
Diamantato da un solo lato.

Disponibile con due tipi di granulometrie:

- **Polishing** (giallo, granulometria 15µm)
- **Opener** (arancione, granulometria 8µm)



VANTAGGI


- Efficiente lucidatura dello smalto interprossimale
- Prese sagomate per una migliore tenuta manuale durante il trattamento

Rif. PXCC8040

Per la creazione manuale dello spazio.
Diamantato da un solo lato.

Disponibile con due tipi di granulometrie:

- **Extracoarse** (blu, granulometria 80µm)
- **Medium** (rosso, granulometria 40µm)

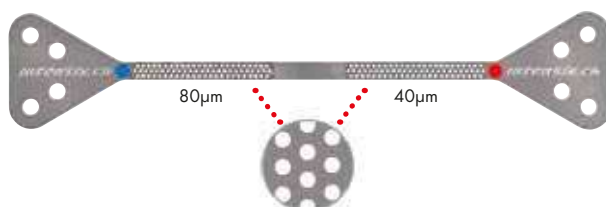

VANTAGGI

- Trattamento senza frizioni grazie alle perforazioni della parte lavorante
- Efficiente riduzione dello smalto interprossimale
- Prese triangolari per una migliore tenuta manuale durante il trattamento

STRUMENTI MECCANICI

REF.	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA DEL DIAMANTE	Q.TÀ x CONF.	PREZZO IN EURO*
 WG-69ASWISS	REF WG-69ASWISS, Intensiv Swingle SWISS EDITION, W&H Synea		1 pz	900,00
WG-69LTSWISS	REF WG-69LTSWISS, Intensiv Swingle SWISS EDITION, W&H Synea with light		1 pz	1.250,00
053	Espulsore Intensiv Swingle		1 pz	30,40
054	Pulitore Intensiv Swingle		1 pz	14,25

INTENSIV ORTHO-STRIPS®

REF.	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA DEL DIAMANTE	Q.TÀ x CONF.	PREZZO IN EURO*
 OS08OP-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided, Opener	8µm	3 pz	84,60
OS08OP-L/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided left, Opener	8µm	3 pz	84,60
OS08OP-R/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided right, Opener	8µm	3 pz	84,60
 OS15POL-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided, Polishing	15µm	3 pz	84,60
OS15POL-L/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided left, Polishing	15µm	3 pz	84,60
OS15POL-R/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided right, Polishing	15µm	3 pz	84,60
 OS25F-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided, Finishing	25 µm	3 pz	84,60
OS25F-L/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided left, Finishing	25µm	3 pz	84,60
OS25F-R/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided right, Finishing	25µm	3 pz	84,60
 OS40M-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided, Medium	40µm	3 pz	84,60
OS40M-L/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided left, Medium	40µm	3 pz	84,60
OS40M-R/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided right, Medium	40µm	3 pz	84,60
 OS60C-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided, Coarse	60µm	3 pz	84,60
OS60C-L/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided left, Coarse	60µm	3 pz	84,60
OS60C-R/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided right, Coarse	60µm	3 pz	84,60
 OS80XC-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Double-Sided, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
OS80XC-L/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided left, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
OS80XC-R/3	Intensiv Ortho-Strips, One-Sided right, Extracoarse	80µm	3 pz	84,60
 OSSet02/6	Intensiv Ortho-Strips System Set02, 6 Assorted Strips, Double-Sided		6 pz	156,60
OSSet02L/6	Intensiv Ortho-Strips System Set02, 6 Assorted Strips, Left-Sided		6 pz	156,60
OSSet02R/6	Intensiv Ortho-Strips System Set02, 6 Assorted Strips, Right-Sided		6 pz	156,60
OST400	Intensiv Ortho-Strips Tray		1 pz	49,00
056ASS/6	Ricambi inserti in silicone		1 pz	8,80

*TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

NEW

INTENSIV ORTHO-STRIPS®, CENTRAL

	REF.	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA DEL DIAMANTE	Q.TÀ x CONF.	PREZZO IN EURO*
	OS15POL-CEN-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	OS15POL-CEN-L/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	OS15POL-CEN-R/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Polishing	15µm	3 pz	84,60
	OS25F-CEN-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Finishing	25µm	3 pz	84,60
	OS25F-CEN-L/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Finishing	25µm	3 pz	84,60
	OS25F-CEN-R/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Finishing	25µm	3 pz	84,60
	OS40M-CEN-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Medium	40µm	3 pz	84,60
	OS40M-CEN-L/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Medium	40µm	3 pz	84,60
	OS40M-CEN-R/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Medium	40µm	3 pz	84,60
	OS60C-CEN-DS/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, Double-Sided, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	OS60C-CEN-L/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, One-Sided left, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	OS60C-CEN-R/3	Intensiv Ortho-Strips, Central, One-Sided right, Coarse	60µm	3 pz	84,60
	OSSetCEN02/6	Intensiv Ortho-Strips System Set02, OP, XC & Central, Double-Sided		6 pz	156,60
	OSSetCEN02L/6	Intensiv Ortho-Strips System Set02, OP, XC & Central, Left-Sided		6 pz	156,60
	OSSETCEN02R/6	Intensiv Ortho-Strips System Set02, OP, XC & Central, Right-Sided		6 pz	156,60
	OST400SET01/6	Intensiv Ortho-Strips System Set01, Tray with Opener & Central Double-Sided		6 pz	167,40
	OST400SET02/6	Intensiv Ortho-Strips System Set02, Tray with OP, XC & Central, Double-Sided		6 pz	167,40
	OST400SET03/6	Intensiv Ortho-Strips System Set03, Tray with OP & Central, Double-Sided		6 pz	167,40

SPESSIMETRI

	REF.	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA DEL DIAMANTE	Q.TÀ x CONF.	PREZZO IN EURO*
	IPRDC010/3	Intensiv IPR-DistanceControl, spessore 0,10 mm		3 pz	27,50
	IPRDC015/3	Intensiv IPR-DistanceControl, spessore 0,15 mm		3 pz	27,50
	IPRDC020/3	Intensiv IPR-DistanceControl, spessore 0,20 mm		3 pz	27,50
	IPRDC025/3	Intensiv IPR-DistanceControl, spessore 0,25 mm		3 pz	27,50
	IPRDC030/3	Intensiv IPR-DistanceControl, spessore 0,30 mm		3 pz	27,50
	IPRDC040/3	Intensiv IPR-DistanceControl, spessore 0,40 mm		3 pz	27,50
	IPRDC050/3	Intensiv IPR-DistanceControl, spessore 0,50 mm		3 pz	27,50
	IPRDC100/3	Intensiv IPR-DistanceControl, spessore 1,0 mm		3 pz	27,50
	IPR-DC SET	Intensiv IPR-DistanceControl Set		8 pz	68,00

STRUMENTI MANUALI

	REF.	DESCRIZIONE	GRANULOMETRIA DEL DIAMANTE	Q.TÀ x CONF.	PREZZO IN EURO*
	AO2018DS/3	Intensiv ApproxOpener, Double-Sided	8µm	3 pz	77,50
	AO2018OS/3	Intensiv ApproxOpener, One-Sided	8µm	3 pz	77,50
	PXPO1508/6	Intensiv ProxoPolish, PXPO1508/6	8/15µm	6 pz	70,80
	PXCC8040/6	Intensiv ProxoContour Coarse, PXCC8040/6	40/80µm	6 pz	70,80

*TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA

PRODOTTI PER
STRIPPING
IN ORTODONZIA

SI RINGRAZIANO
PER LE FOTOGRAFIE
CLINICHE CONCESSE:

- DOTT. M. CIARAVOLO, NAPOLI, ITALIA
- DOTT. F. GARINO, TORINO, ITALIA
- DOTT.SSA G. FORTINI, FIRENZE, ITALIA
- DOTT.SSA E. CARLI, MASSA CARRARA, ITALIA
- DOTT. A. CABURLOTTO, VENEZIA, ITALIA
- DOTT. F. GIUNTOLI, PISTOIA, ITALIA

FABBRICATO DA



INTENSIV SA

Via Molino 107
6926 Montagnola, Svizzera
Tel. +41 91 986 50 50
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

DISTRIBUITO IN ITALIA DA



LEONE S.p.A.

Via P. a Quaracchi 50
50019 Sesto Fiorentino, Firenze, Italia
Tel. +39 055 30 44 1
Fax +39 055 37 48 08
info@leone.it
www.leone.it

UFFICIO VENDITE ITALIA

Tel. +39 055 30 44 600
Fax +39 055 37 48 08
italia@leone.it