



Come importare librerie
Leone_XCN su **3Shape**®

1. Aprire l'applicazione Dental Manager

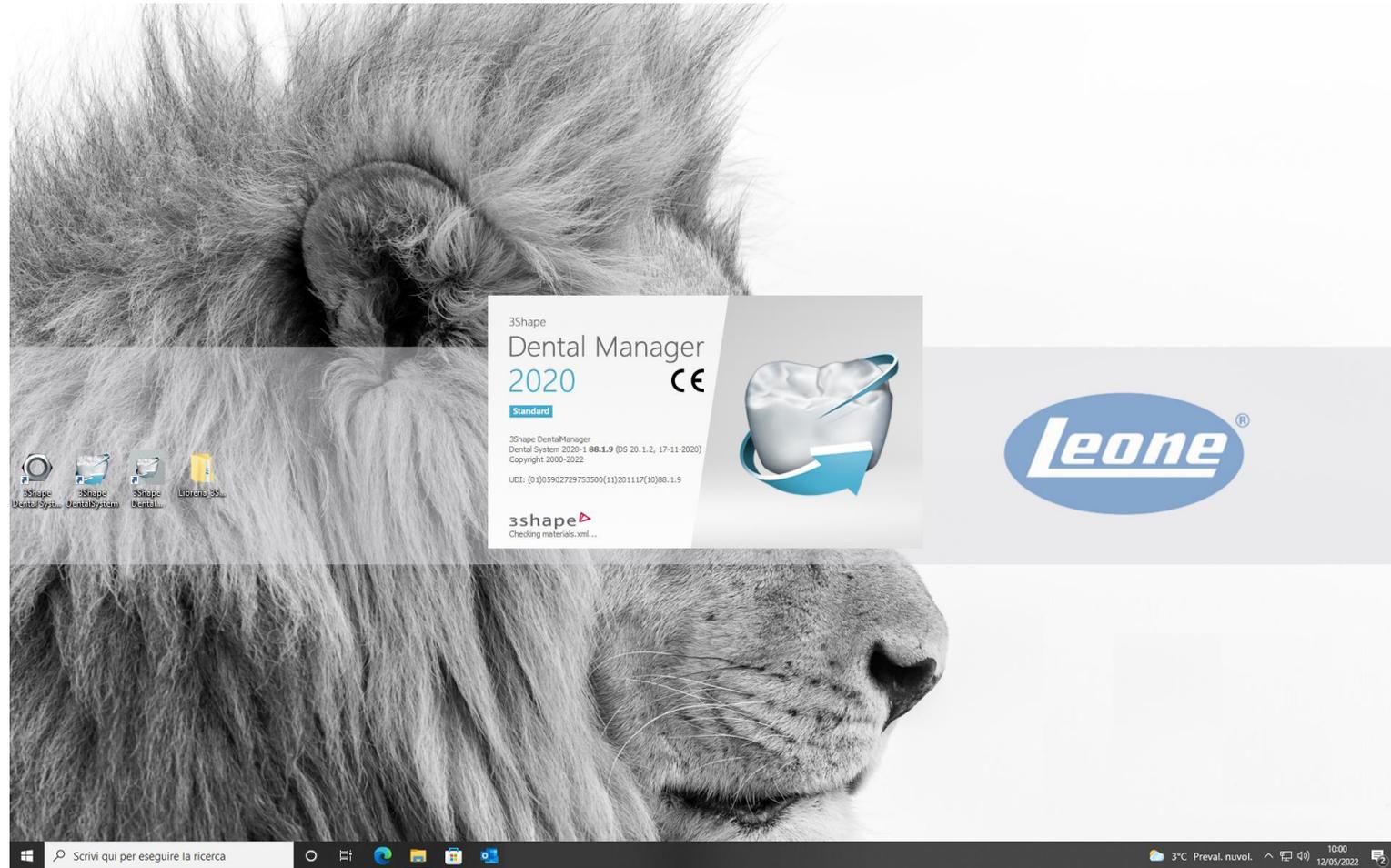

Come importare librerie
Leone_XCN su **3Shape**®

2. Cliccare sull'icona indicata di seguito (quadrato rosso) e lanciare 3Shape Dental System Control Panel

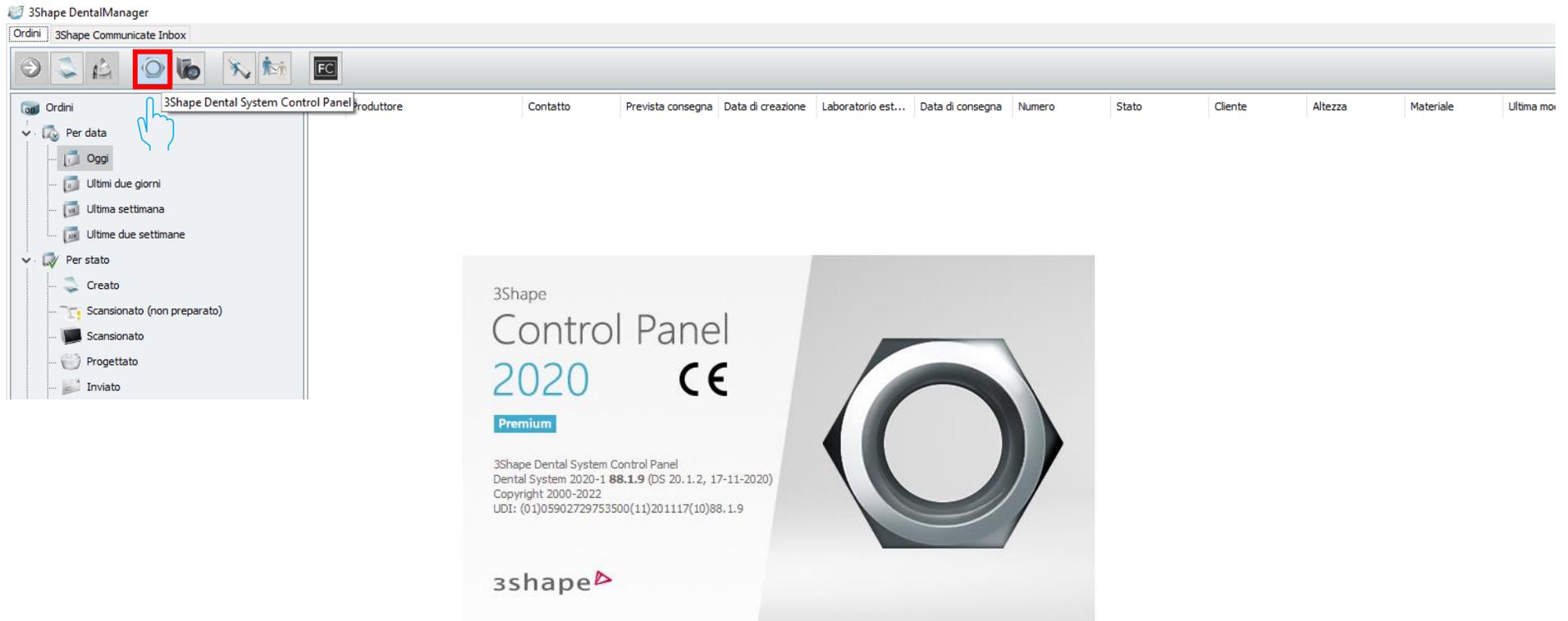

3. Sotto la voce Strumenti selezionare «Importa/Esporta»

The screenshot shows the 3Shape Dental System Control Panel interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Indietro', 'Salva', and 'Aiuto'. The main content area is divided into several sections:

- Impostazioni di sistema**
 - Impostazioni di sistema
 - Pulizia sistema
 - Opzioni di design
 - Servizi
 - Flusso di lavoro automatico
- DentalManager**
 - Generale
 - Manufacturing Inbox
 - ERP e tempi di elaborazione
 - Importazione dell'ordine
 - Giorni lavorativi
 - Applicazioni di terze parti
 - Macchinari di fresatura
- Impostazioni sito**
 - Questo sito
 - Dentisti
 - Laboratori
 - Produttori
 - Operatori
 - Paesi
 - Processi di produzione
- Strumenti** (highlighted with a red box)
 - Gestione abbonamento (Dongle)
 - Importa/Esporta
 - Centro di download
 - Centro di formazione
 - 3Shape Communicate
- Elementi base**
 - Materiali
 - Colori
 - Linea di margine
 - Attacchi
 - Overlay di design 2D
 - Blocchi CAD
 - canali di colata Press Multi
- Elementi anatomici**
 - Libreria scansione
 - Librerie di intermedi e di anatomie
 - Librerie smile
 - Denti artificiali
 - Corone
 - Corone intermedie
 - Inlay
 - Onlay/Veneer
 - Corone provvisorie
 - Intermedi provvisori
 - Restauro provv. sul modello preparato
 - Faccette additive
- Armature**
 - Cappette
 - Strutture degli intermedi
 - Wax-up
 - Telescopiche primarie
- Abutment**
 - Librerie di cappette dell'abutment
 - Sistemi di impianti
- Perno-Moncone**
 - Sistemi di perno-moncone
 - Perni-moncone
- Elementi del ponte**
 - Barre
 - Connettori
- Protesi totali**
 - Impostazioni design
 - Gengive
 - Elenco Librerie smile
- Scheletrati**
 - Armature
 - Connettori e appoggi
 - Profilo delle strisce in cera
 - Ritenzioni
 - Cere ruvide
- Modello digitale**
 - Design modello digitale
 - Interfacce dell'articolatore
- Apparecchi**
 - Orthodontics Control Panel
 - Guida di posizionamento

4. Selezionare «Importa materiali»

3Shape Dental System Control Panel - Esporta/Importa materiali

Home Indietro Salva Aiuto

Strumenti ▶ **Importa/Esporta**

Attività

- Esporta materiali
- Importa materiali

Importa materiali


Per importare nuovi materiali, fare clic su "Importa materiali" e caricare il file desiderato (estensione ".dme"). Selezionare quindi i materiali dall'elenco che verrà visualizzato e fare clic su "Importa". Normalmente, si consiglia di selezionarli tutti. È inoltre possibile scaricare i materiali direttamente dall'FTP - accedere a Impostazioni sito -> Pagina siti e fare clic su "Scarica materiali".

Importa materiali


Cronaca materiali importati

Esporta materiali


Clona sistema

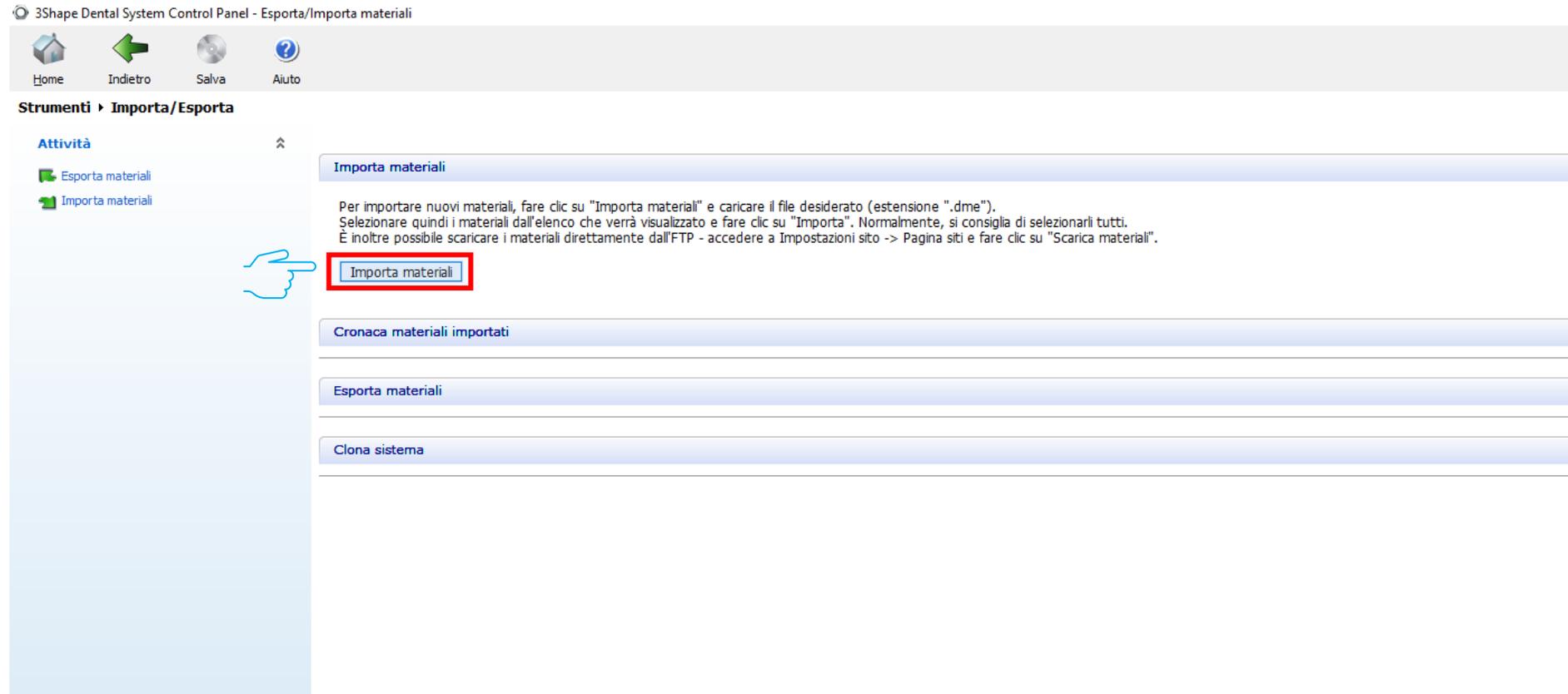


5. Trovare la cartella unzippata «Libreria_3Shape»

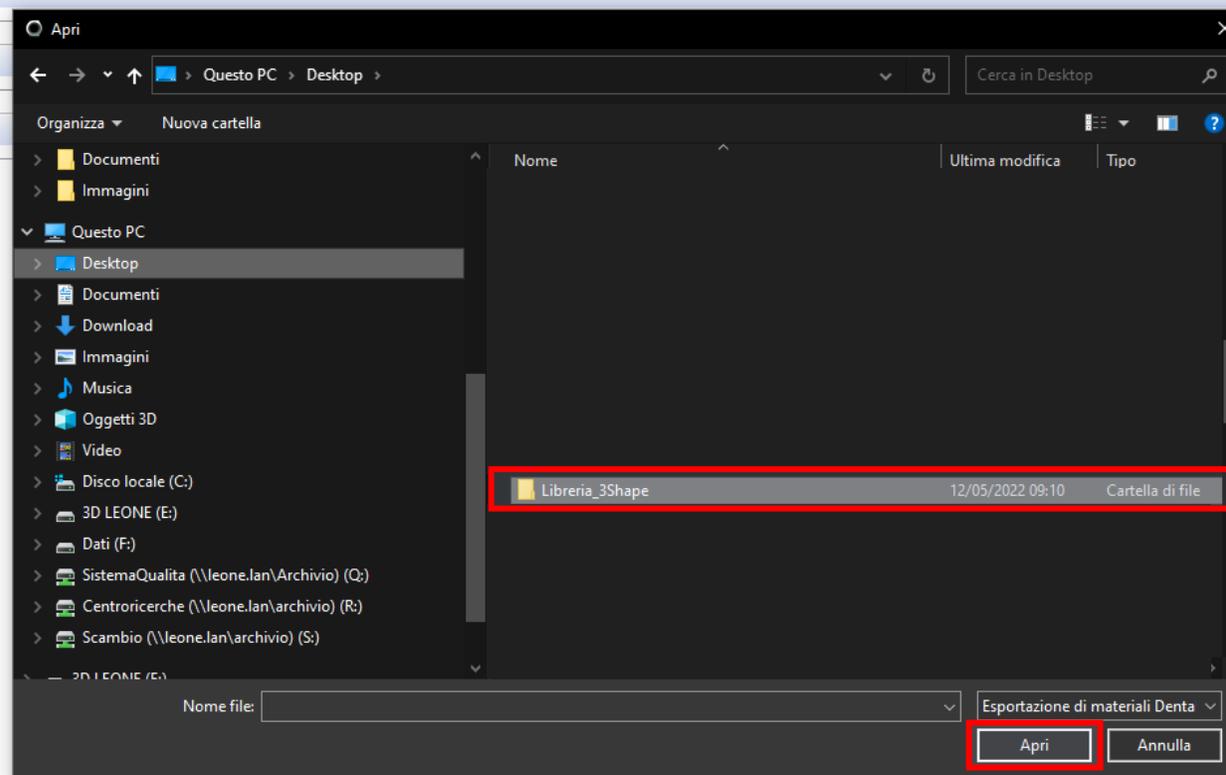

6. Selezionare il file .dme «Leone_XCN AAAA.V»

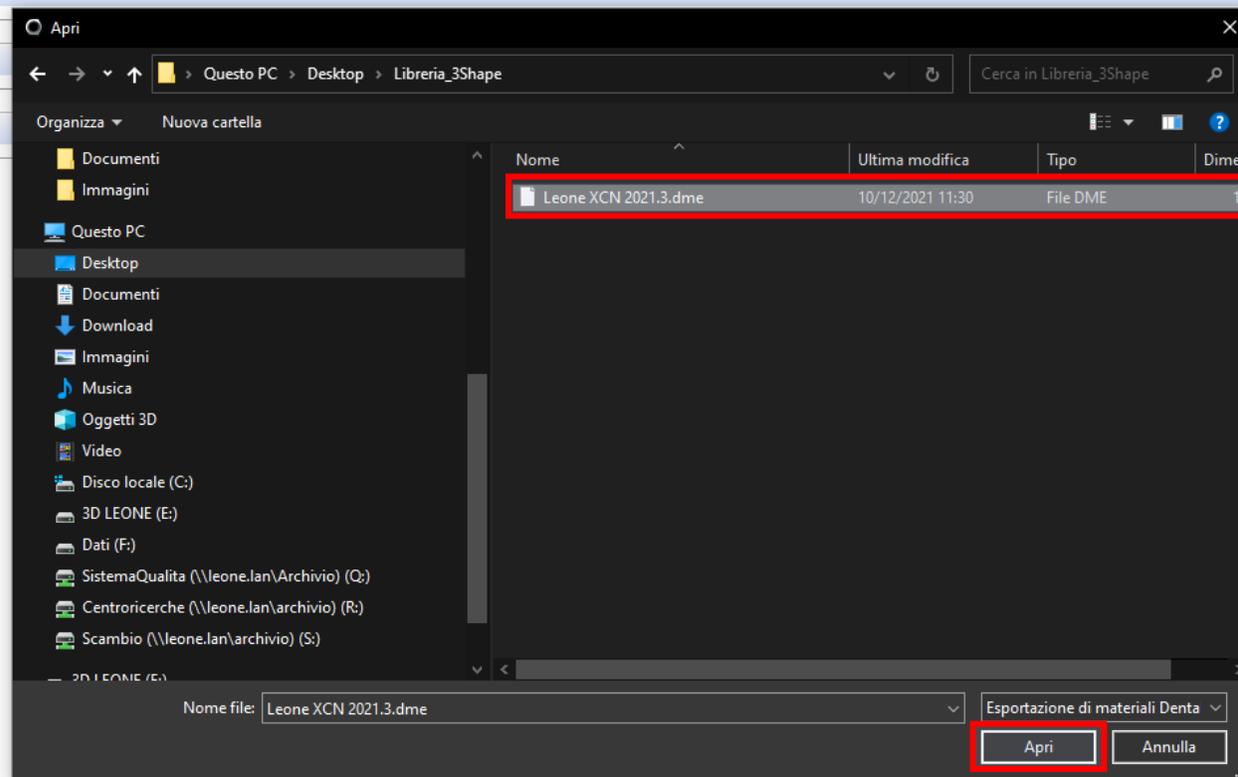

7. Selezionare «Importa»

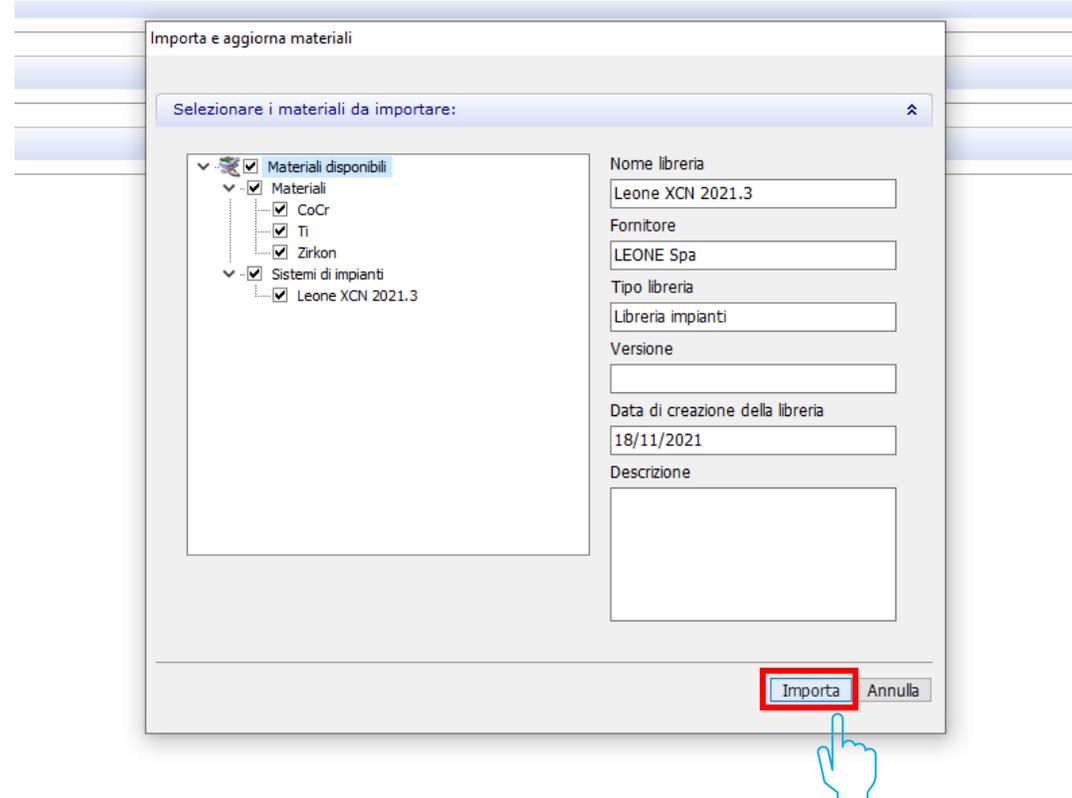

8. Le librerie Leone al termine della procedura sono attive nel software

