


Sistema Implantare XCN®

MUA Estetici

per protesi avvitata multipla e accessori

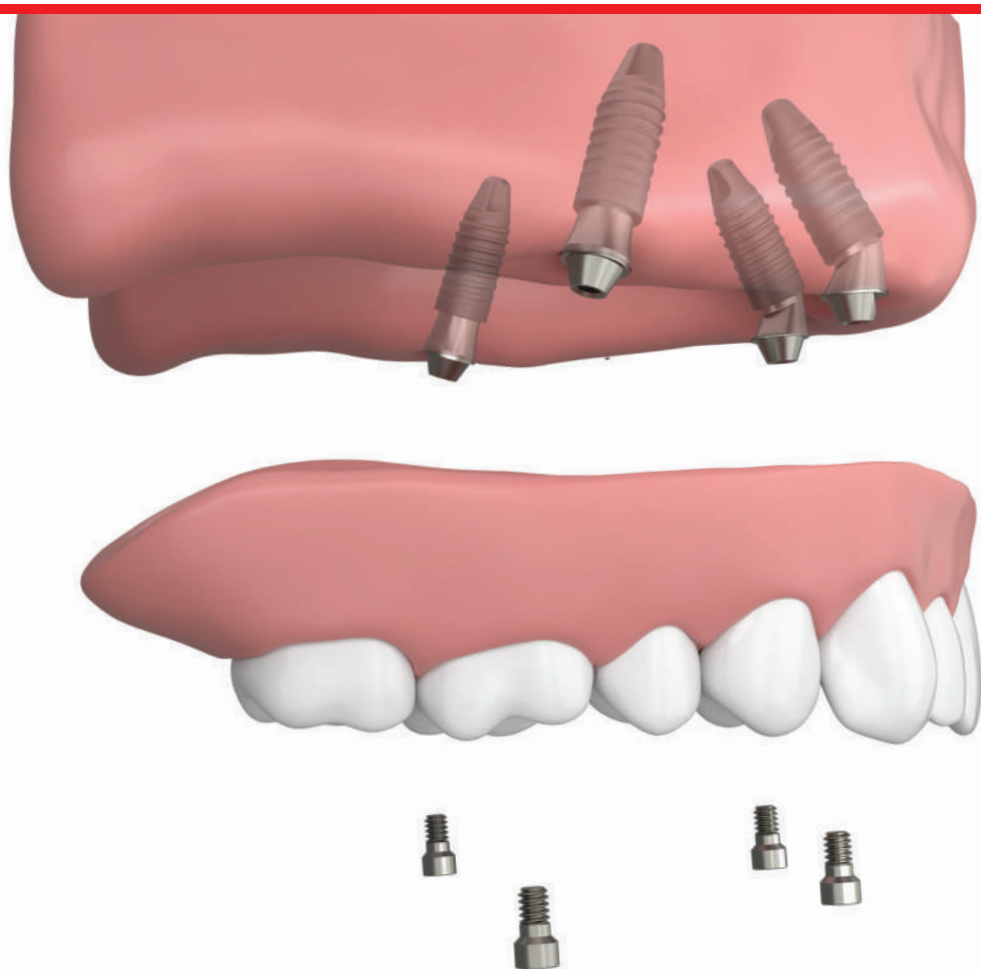

Leone®

NEW!

MUA Estetici

Multi-Unit Abutment



Ideali in caso di

- edentulie parziali (ponti)
- edentulie totali (Toronto Bridge e overdenture su barra)
- carico immediato (All-on-Four)
- guarigione transgengivale (con apposita vite di guarigione)


Caratteristiche


- fabbricati in titanio grado medicale 5 ELI
- emergenza tronco-conica con semiangolo a 22° per il recupero del disparallelismo
- **piattaforma protesica unica** di 3,8 mm per ambedue le connessioni (2.2 verde e 3.0 gialla)
- fornito con vite polifunzionale premontata per facilitare il posizionamento e l'orientamento

Massima estetica e salute dei tessuti

Progettati per **aumentare lo spazio dei tessuti perimplantari**, con grande beneficio sia per il risultato estetico finale che per la salute dei tessuti, grazie alle seguenti caratteristiche:

- peculiare design del tratto transmucoso
- piattaforma protesica unica con un diametro di soli 3,8 mm
- spostamento linguale della piattaforma protesica dei monconi angolati.

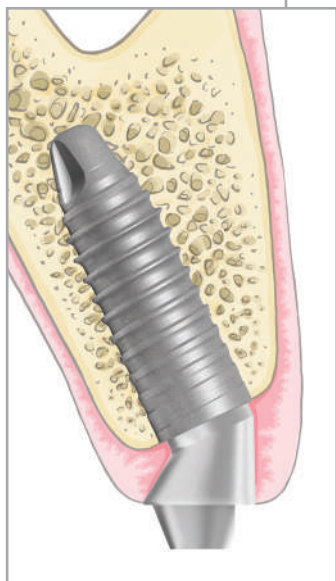

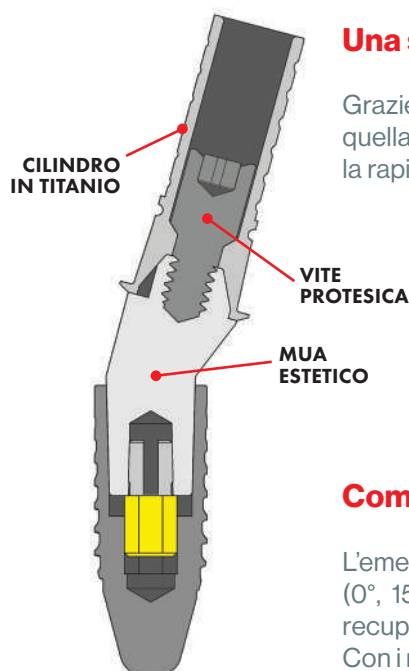



Una sola vite da gestire

Grazie alla connessione impianto-moncone con Morse si gestisce una sola vite, quella protesica, anche in caso di monconi angolati, aumentando notevolmente la rapidità delle procedure.

Compensazione fino a 44° con MUA dritti

L'emergenza tronco-conica con semiangolo a 22° e le tre angolazioni disponibili (0°, 15° e 25°) in tre altezze transmucose (GH 1,5, 3 e 5 mm) consentono il recupero di ogni grado di disparallelismo.

Con i monconi dritti si può raggiungere un asse di inserzione comune fino ad una divergenza di 44° e con quelli angolati a 25° fino ad una divergenza di 94°.

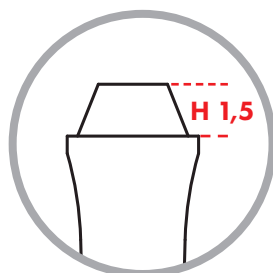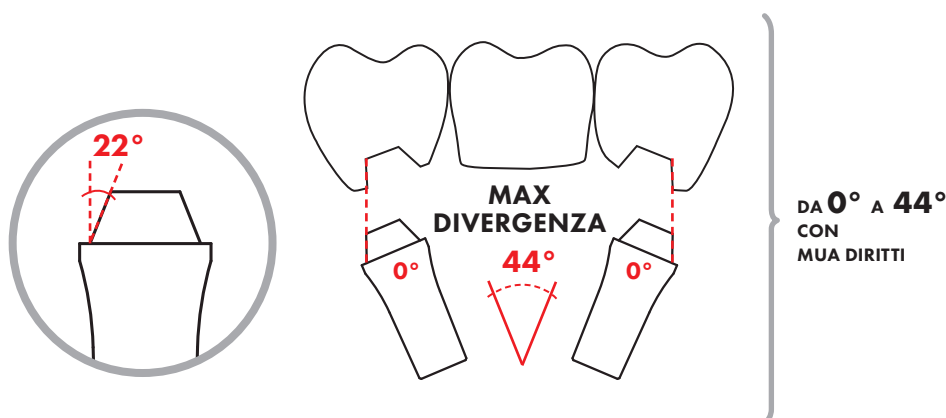


Ideali anche con ridotta dimensione verticale

L'emergenza tronco-conica **extra low profile** con un'altezza di soli 1,5 mm rende i MUA Estetici ideali anche in caso di ridotta dimensione verticale.



Totale libertà

Sia la connessione XCN® 360° che le viti con innesto Torx consentono un libero orientamento del canale della vite; l'innesto Torx offre inoltre la possibilità di angolare il canale vite fino a 20°.

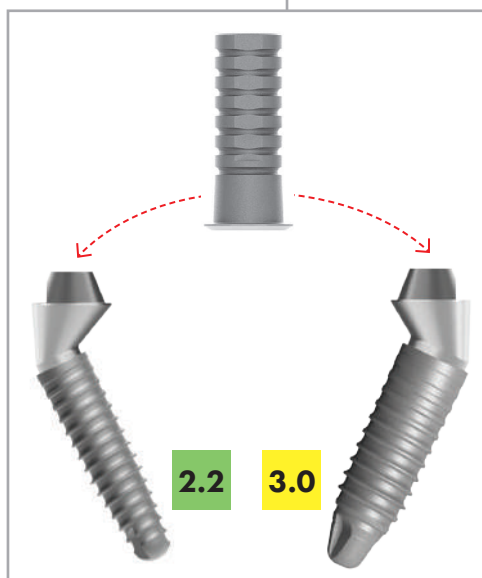

Magazzino ottimizzato

La piattaforma protesica unica permette l'utilizzo degli stessi accessori protesici per entrambe le connessioni protesiche (2.2 verde e 3.0 gialla) riducendo il numero di accessori necessari e le possibilità di errori.




Sicura ritenzione della protesi

La **superficie microsabbiata** e le scanalature profonde del cilindro da incollaggio e dell'interfaccia CAD-CAM permettono una sicura ritenzione nella protesi.




Massima estetica

La spalla di soli 0,3 mm del cilindro da incollaggio e dell'interfaccia CAD-CAM migliora l'estetica della protesi.

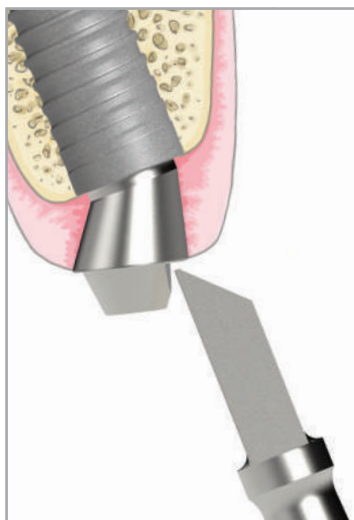

Agevole attivazione anche dei monconi angolati

I monconi angolati sono dotati di una tacca che indica il lato sulla testa del moncone sul quale appoggiare la punta per battuta per ottenere un'efficace attivazione.

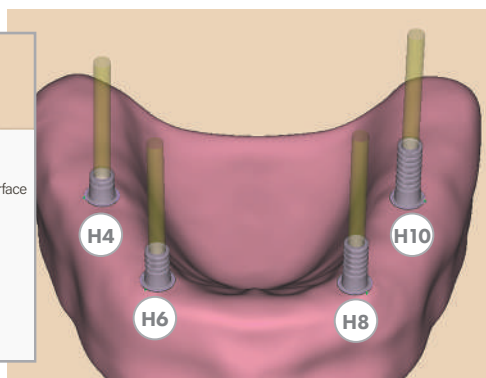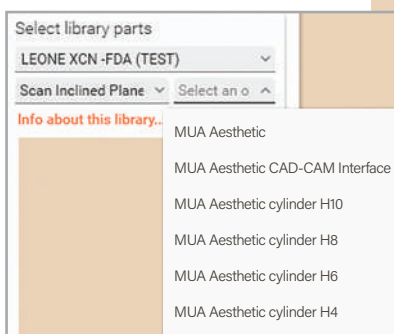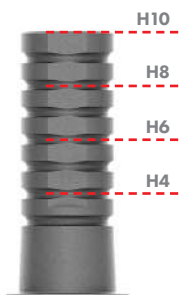

Altezza modulabile anche in digitale

È possibile scegliere tra quattro altezze diverse del cilindro da incollaggio anche nel workflow digitale.



Accurata scansione

Gli Scan Body Inclined Plane in **titanio con superficie satinata** rendono più efficiente l'acquisizione con gli scanner digitali.



MUA Estetici

Strumenti necessari

- scelta del MUA Estetico più idoneo con gli Abutment Gauge
- **MUA Estetici dritti**: attivazione della connessione con il percussore con punta dritta o curva in PEEK
- **MUA Estetici angolati**: attivazione della connessione con il percussore con punta piatta



VIDEO
TUTORIAL

Confezione

- 1 moncone montato su vite polifunzionale
- 1 esagono (escluso i dritti)



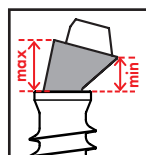


TABELLA
ALTEZZA GH

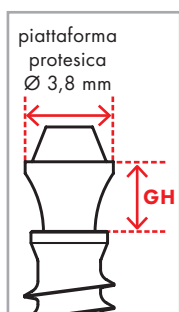

	1:1		
Ø connessione (mm)	2,2	2,2	2,2
Ø piattaforma protesica (mm)	3,8	3,8	3,8
GH (mm)	1,5	3	5
diritti	127-2201-01	127-2203-01	127-2205-01
REF angolati 15°	127-2201-15	127-2203-15	127-2205-15
angolati 25°	127-2201-25	127-2203-25	127-2205-25

	1:1		
Ø connessione (mm)	3,0	3,0	3,0
Ø piattaforma protesica (mm)	3,8	3,8	3,8
GH (mm)	1,5	3	5
diritti	127-3001-01	127-3003-01	127-3005-01
REF angolati 15°	127-3001-15	127-3003-15	127-3005-15
angolati 25°	127-3001-25	127-3003-25	127-3005-25

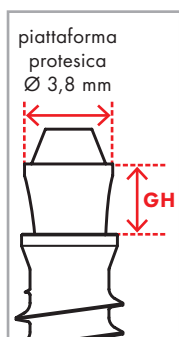


Vite di guarigione per MUA Estetici

- fabbricata in titanio grado medicale 5 ELI
- per condizionare i tessuti molli con il MUA Estetico
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

Strumenti necessari:

raccordo per viti corto o lungo

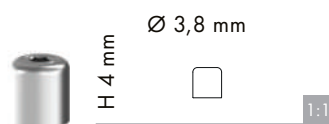


REF **127-2230-00**

Transfer da riposizionamento per MUA Estetici

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per rilevare la posizione del MUA Estetico fissato all'impianto
- per tecnica a cucchiaino chiuso
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

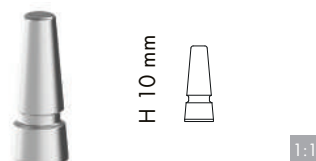

REF **144-2710-00**



Transfer Pick-Up per MUA Estetici

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per rilevare la posizione del MUA Estetico fissato all'impianto
- per tecnica a cucchiaino aperto
- autoclavabile


Confezione:

1 transfer Pick-Up

1 vite Pick-Up

Strumenti necessari:

raccordo per viti corto o lungo

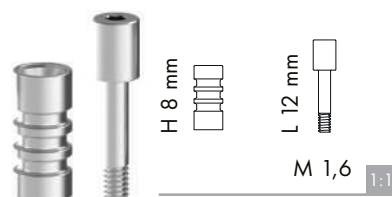


REF **144-2708-01**

Analoghi MUA Estetici

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per replicare nel modello in gesso la posizione del MUA Estetico fissato all'impianto
- versione angolata per assicurare una quantità di gesso sufficiente in tutte le situazioni

Confezione: 1 pezzo

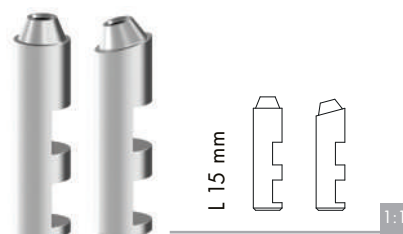

diritto

REF **146-2715-00**


angolato 15°

REF **146-2715-15**

Scan Body Inclined Plane LONG* per MUA Estetici

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- per rilevare la posizione del MUA Estetico attraverso la presa di impronta ottica intraorale o la digitalizzazione del modello in laboratorio
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

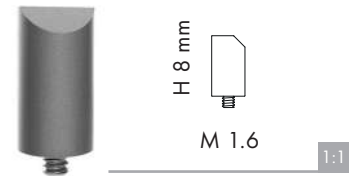

REF **141-0227-35**

Scan Body Inclined Plane* per MUA Estetici

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- per rilevare la posizione del MUA Estetico attraverso la presa di impronta ottica intraorale o la digitalizzazione del modello in laboratorio
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



REF **141-0327-35**

Posizionatore per Scan Body per MUA Estetici

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per posizionare, avvitare e svitare lo Scan Body sul MUA Estetico
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



REF **141-0001-35**




Analogo digitale* per MUA Estetici

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per essere inserito all'interno di un modello prototipato originato da un'impronta ottica intraorale del MUA Estetico
- con meccanismo a scatto che lo blocca nel modello prototipato

Confezione:

1 analogo

1 vite polifunzionale per il posizionamento nel modello

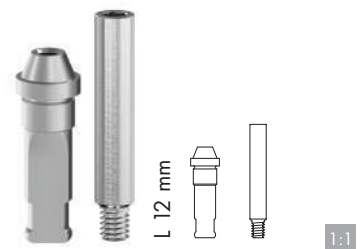

REF **142-2710-54**

**Sul sito Leone sono scaricabili le librerie dei software CAD-CAM in cui il sistema Leone è presente: www.leone.it/implantologia*



*Sul sito Leone sono scaricabili
le librerie dei software CAD-CAM
in cui il sistema Leone è presente:
www.leone.it/implantologia

Interfaccia CAD-CAM* per MUA Estetici

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- per fissare la protesi ai MUA Estetici in caso di tecniche di incollaggio (es. strutture in zirconia, PEEK, ecc.)

- torque consigliato 20 Ncm
- autoclavabile

Confezione:

2 interfacce CAD-CAM

2 viti di connessione Torx a testa bassa per MUA Estetici

Strumenti necessari:

avvitatore manuale Torx corto o lungo
oppure avvitatore per manipolo Torx



Ø 4,5 mm



REF **127-0404-00**

Cilindro da incollaggio* per MUA Estetici

- fabbricato in titanio grado medicale 5 ELI
- per fissare la protesi ai MUA Estetici
- altezza modellabile anche in digitale: H 10, 8, 6 e 4 mm
- spessore parete 0,5 mm
- torque consigliato 20 Ncm
- autoclavabile

Confezione:

2 cilindri da incollaggio

2 calcinabili per cilindro da incollaggio

2 viti di connessione Torx a testa bassa per MUA Estetici

2 viti di connessione Torx a testa alta per MUA Estetici

Strumenti necessari:

avvitatore manuale Torx corto o lungo
oppure avvitatore per manipolo Torx



Ø 4,5 mm



REF **127-0410-00**



Viti di connessione Torx T6 per MUA Estetici

- fabbricate in titanio grado medicale ELI
- per fissare la protesi ai MUA Estetici
- possibilità di realizzare un canale vite angolato fino a 20°
- torque consigliato 20 Ncm
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

Strumenti necessari:

avvitatore manuale Torx corto o lungo
oppure avvitatore per manipolo Torx

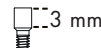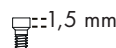

M 1,6

M 1,6

testa bassa
testa alta

REF **127-0101-00**

REF **127-0101-06**




HEX 1.2

Vite polifunzionale per MUA estetici

- fabbricata in titanio grado medicale 5 ELI
- per posizionare i MUA Estetici negli impianti
- per facilitare l'orientamento e la parallelizzazione dei MUA Estetici
- autoclavabile

Confezione: 2 pezzi

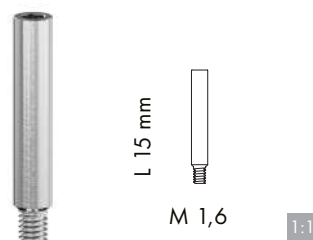

REF **127-0115-06**



TORX T6

Avvitatore Torx per manipolo

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per avvitare e svitare le viti di connessione Torx usando il manipolo contrangolo
- non utilizzare con torque superiori a 20 Ncm
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo



REF **156-1002-27**



TORX T6

Avvitatori manuali Torx

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per avvitare e svitare le viti di connessione Torx
- da usare con l'avvitatore manuale protesico, il cricchetto dinamometrico protesico o l'avvitatore dinamometrico da laboratorio
- autoclavabili

Confezione:

- 1 avvitatore manuale Torx
- 1 avvitatore manuale protesico





REF **156-1000-27 156-1001-27**

Riabilitazione post-estrattiva dell'arcata superiore a carico immediato con MUA Estetici

Dott. Fabrizio dell'Innocenti, Odt. Massimiliano Pisa

Posizionamento post-estrattivo immediato di 4 impianti Max Stability 3,75, carico immediato con Toronto provvisoria e progettazione CAD-CAM della protesi definitiva

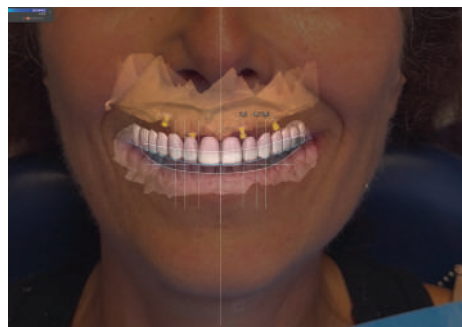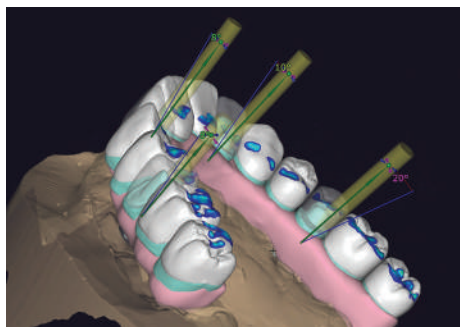

TRADITION MEETS
THE *FUTURE*



Leone s.p.a.

Via P. a Quaracchi 50, 50019
Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

Ufficio Vendite Italia:

Tel. 055.3044600 | italia@leone.it
www.leone.it